

## Navina Insert – Produktinformationen

### Produktbeschreibung

Analtampon.

### Haltbarkeit und Anwendungen

Die Haltbarkeit des Navina Insert beträgt 5 Jahre.  
Der Navina Insert ist ein Einmalprodukt und darf nur einmal verwendet werden, bevor er entsorgt wird.

### Materialzusammensetzung

**Material des Einsatzes:** Silikon-Elastomer, Mineralöl, Vaseline  
**Primärpackmittel:** PE/Nylon  
**Sekundärpackmittel:** Wellpappe

### Verwendungszweck

Der Navina Fecal Incontinence Insert ist ein rektal-analer Einsatz, der erwachsene Menschen ab 18 Jahren und Pflegepersonen beim Umgang mit Stuhlinkontinenz unterstützen soll. Das Produkt soll dabei helfen, zu verhindern, dass ungewollt Stuhl aus dem Analkanal austritt. Das Medizinprodukt für den Einmalgebrauch wird über den Anus in den Analkanal und das Rektum eingeführt. Das Produkt wirkt an der anorektalen Übergangsstelle und dem Analkanal und passt sich dort an, um das ungewollte Austreten von Stuhl zu verhindern.

### Indikationen

Der Navina Insert ist für die Behandlung von ungewolltem Stuhlverlust (Accidental Bowel Leakage, ABL) aufgrund von Stuhlinkontinenz vorgesehen. Der Rektaleinsatz ist so konzipiert, dass er selbst eingeführt werden kann, um abzudichten und den ungewollten Stuhlverlust aus dem Rektum zu verhindern.

### Risiken

- Mögliche leichte Reizung oder Beschwerden des Anus oder Analkanals.
- Mögliche Wanderung oder Verschiebung des Einsatzes in den Analkanal oder das Rektum.
- Unerwarteter Ausstoß.

### Warnungen, Vorsichtsmaßnahmen und Kontraindikationen

Stuhlinkontinenz kann medizinisch behandelt werden. Der Navina Insert soll kein Ersatz für chirurgische Optionen zur Behandlung einer Stuhlinkontinenz sein. Wenden Sie sich an Ihren Arzt, um professionelle Hilfe zu erhalten.

- Der Navina Insert ist für die Verwendung bei Kindern kontraindiziert.
- Das Produkt ist nicht steril und nur für den Einmalgebrauch bestimmt.
- Eine erneute Verwendung könnte das Produkt beschädigen.
- Nicht verwenden, wenn die Verpackung geöffnet oder beschädigt ist.
- Nicht verwenden, wenn Sie gegen Silikon allergisch sind.
- Nicht zusammen mit Zäpfchen verwenden.

### Brechen Sie in den folgenden Fällen die Verwendung von Navina Insert sofort ab und wenden Sie sich an Ihren Arzt:

- Blutiger Stuhl oder Blutungen aus dem Rektum.
- Blutende Hämorrhoiden.
- Schmerzen im Anal-/Rektalbereich, Reizungen, Krämpfe, Risse oder Fissuren.
- Verlagerung des Navina Fecal Incontinence Insert in den Analkanal oder das Rektum, sodass der Tampon beim nächsten Stuhlgang nicht ausgeschieden wird.
- Operation im Rektalbereich innerhalb der letzten 4 Wochen.



### Navina Insert

Artikelnummer	Typ	Angaben
6930400	Navina Insert Normal	Karton mit 30 Stück
6930500	Navina Insert Large	Karton mit 30 Stück
6930600	Navina Insert Starter Pack	Karton mit 5 Einheiten Standard und 5 Einheiten Large

**Navina™** Insert



Manufacturer: Minnesota Medical Technologies  
2446 Henry Road Northwest Stewartville,  
MN 55976 USA 507-533-0366  
<https://www.mnmedicaltechnologies.com/>



Importer: Wellspect HealthCare, Aminogatan 1,  
P.O. Box 14, SE-431 21 Mölndal, Sweden.  
Phone: +46 31 376 40 00. [www.wellspect.ch](http://www.wellspect.ch)



MPS Medical Product Service GmbH  
Borngasse 20 Braunfels 35619  
Germany